

İYON[®] 25 ml

serum fizyolojik damla

FORMÜLÜ:

% 0.9 Sodyum Klorür ve saf su içerir.
Katkı maddesi içermez.

ÖZELLİKLER:

Burun mukozası, solunan havanın temizlenmesinden ve nemlendirilmesinden sorumludur. Burun mukozasının temel işlevi hava yoluyla gelen mikroorganizmaların ve alerjenlerin oluşturacağı reaksiyonları önlemek, burnu nemlendirmek ve ısısını sağlamaktır. Ancak dış uyaranların oluşturduğu reaksiyon sonrası burun mukozası salgısı yoğunlaşır, ödem oluşur ve burunda tıkanık meydana gelir.


İyon damla, burun deliklerine damlatma şeklinde uygulanır. Burun mukozası sıvısının viskozitesini azaltır. Post nazal akıntıya sebep olmaksızın burun tıkanıklığını azaltır. Burun nemlendirilmesini ve ısısını sağlar.

KULLANIM YERİ:

Burun tıkanıklığında, çeşitli burun problemlerinde, burun boşluklarının korunmasına katkı sağlama amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE POZOLOJİ:

Günde 2 veya 3 kez kullanılır. Her burun deliğine 1 veya 2 damlatma uygulanır.
Kullanıcı Profili: Yetişkinler ve Çocuklar Oda sıcaklığında saklayınız.

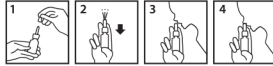

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Eğer kullanmakta olduğunuz bir ilaç varsa kullanmadan önce doktor ve eczacınıza danışınız.
Doktorunuzun uygun gördüğü şartlarda kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza bilgi veriniz.



ÜRETİCİ

İYON SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK
İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Osmangazi Mah. Battalgazi Cad.
No:15/1 Sancaktepe

İstanbul - Tel.: +90 216 365 38 83

bilgi@iyonmedical.com

www.iyonmedical.com

KK1002.03 Yayın Tar. 11.10.2011

Rev. Tar. 25.05.2022

REF-SFD025



İYON[®] 25 ml

serum fizyolojik sprey

FORMÜLÜ:

% 0.9 Sodyum Klorür ve saf su içerir.
Katkı maddesi içermez.

ÖZELLİKLER:

Burun mukozası, solunan havanın temizlenmesinden ve nemlendirilmesinden sorumludur. Burun mukozasının temel işlevi hava yoluyla gelen mikroorganizmaların ve alerjenlerin oluşturacağı reaksiyonları önlemek, burnu nemlendirmek ve ısısını sağlamaktır. Ancak dış uyaranların oluşturduğu reaksiyon sonrası burun mukozası salgısı yoğunlaşır, ödem oluşur ve burunda tıkanık meydana gelir.


İyon damla, burun deliklerine damlatma şeklinde uygulanır. Burun mukozası sıvısının viskozitesini azaltır. Post nazal akıntıya sebep olmaksızın burun tıkanıklığını azaltır. Burun nemlendirilmesini ve ısısını sağlar.

KULLANIM YERİ:

Çeşitli sinüs ve burun problemlerinde burun tıkanıklığında, burun boşluklarının korunmasına katkı sağlama amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE POZOLOJİ:

Günde 2 veya 3 kez kullanılır. Her burun deliğine 1 veya 2 damlatma uygulanır.
Kullanıcı Profili: Yetişkinler ve Çocuklar Oda sıcaklığında saklayınız.

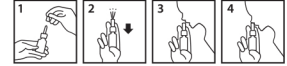

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Eğer kullanmakta olduğunuz bir ilaç varsa kullanmadan önce doktor ve eczacınıza danışınız.
Doktorunuzun uygun gördüğü şartlarda kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza bilgi veriniz.



ÜRETİCİ

İYON SAĞLIK MEDİKAL KOZMETİK
İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

Osmangazi Mah. Battalgazi Cad.
No:15/1 Sancaktepe

İstanbul - Tel.: +90 216 365 38 83

bilgi@iyonmedical.com

www.iyonmedical.com

KK1002.03 Yayın Tar. 11.10.2011

Rev. Tar. 25.05.2022

REF-SFS025

